



Общество с ограниченной ответственностью НПФ «СОНИС»

## БОКС ДЛЯ ШЛИФМАШИНЫ

Паспорт 3.247-00-00 ПС

### Введение

Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием изготовителем основные параметры и технические характеристики бокса для шлифмашины (далее бокс), а также позволяет ознакомиться с его устройством и порядком работы.

В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкция бокса может несколько отличаться от приведенной в паспорте.

### 1. Назначение

1.1. Бокс используется совместно с шлифмашиной служит для защиты глаз, лица, органов дыхания от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом абразива, при выполнении шлифовки и полировки.

### 2. Технические данные

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1 Напряжение питания, В.....                   | 220             |
| 2.2 Частота сети, Гц.....                        | 50              |
| 2.3 Масса, кг, не более.....                     | 2               |
| 2.4 Габаритные размеры, мм, не более.....        | 230x206x290     |
| 2.5 Габариты защитного экрана, мм, не более..... | 245x190x3       |
| 2.6 Режим работы.....                            | продолжительный |

### 3. Комплектность

В комплект поставки входят:

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 1. Бокс для шлифмашины.....                | 1 шт. |
| 2. Защитный экран.....                     | 1 шт. |
| 3. Лампа энергосберегающая E14, 11 Вт..... | 1 шт. |
| 4. Поддон.....                             | 1 шт. |
| 5. Паспорт.....                            | 1 шт. |
| 6. Упаковка.....                           | 1 шт. |

### 4. Устройство и принцип работы

Принцип работы бокса основан на сборе частиц пыли при обработке изделий из пластмассы и металла, для последующей их утилизации.

### 5. Подготовка к работе

- 5.1 Перед вскрытием упаковки проверьте ее сохранность.
- 5.2 После вскрытия упаковки проверьте отсутствие механических повреждений, комплектность.
- 5.3 После транспортировки в холодное время бокс следует выдержать при комнатной температуре в течении 8 часов для удаления конденсата.
- 5.4 Установите бокс на ровную поверхность рядом со шлифмашиной.
- 5.5 Установите защитный экран 2 в стеклодержатель, зажмите подкладкой и затяните винтом, выставите необходимый угол экрана для работы, зафиксируйте положение экрана с помощью регулировочной гайки 3. В бокс установите поддон 5. При необходимости установите рукав пылесоса в резиновое кольцо 4 для устранения пыли.
- 5.6 Инструмент (абразивный круг, щетка и т. д.) закрепленный на шлифмашине необходимо расположить рабочей зоне бокса.
- 5.7 Включите бокс в сеть переменного тока напряжением 220В.
- 5.8 Обработка заготовок происходит в рабочей зоне бокса.

5.9 После окончания работы отключите бокс от сети.

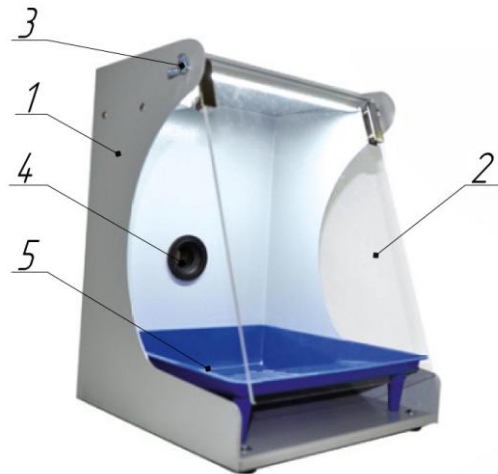


Рис. 1 Бокс для шлифмашины:

1. Корпус; 2. Защитный экран; 3. Регулировочная гайка;  
4. Резиновое кольцо для установки рукава пылесоса; 5. Поддон.

#### **6. Указание мер безопасности**

- 6.1 Не подвергайте бокс ударам.  
6.2 Не оставляйте включенный бокс без присмотра.  
6.3 Мощность энергосберегающей лампы не должно быть более 11 Вт.  
6.4 Отключение бокса производится отсоединением от сети переменного тока 220В.

#### **7. Техническое обслуживание**

- 5.1 Своевременная очистка поддона от пыли и отходов после обработки изделий.

#### **8. Транспортировка и хранение**

- 6.1 Бокс в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытых помещениях при температуре от -50 до +40°C, относительной влажности воздуха до 98% при 25°C  
6.2 Транспортировка упакованного бокса производится при температуре от -50°C до +40°C  
6.3 Транспортировка бокса производится всеми видами транспортных средств в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.

#### **9. Свидетельство о приемке**

Бокс соответствует техническим условиям изготовителя и признан годным к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_ Заводской № \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_  
СБОРЩИК

(ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ)

(РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

#### **10. Свидетельство об упаковке**

Бокс упакован ООО НПФ «СОНИС» согласно требованиям предусмотренными в действующей технической документации.

УПАКОВЩИК

(ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ)

(РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

#### **11. Гарантийные обязательства**

При соблюдении правил эксплуатации изложенных в настоящем паспорте, предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу бокса на протяжении 12 месяцев с момента продажи. При отсутствии отметки о продаже, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления.

Отметка торгующей организации \_\_\_\_\_ Дата продажи «    » \_\_\_\_\_ 20    г.  
Изготовитель ООО НПФ «СОНИС» Россия, 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119В

тел./факс. (473) 239-87-80, +7(952) 958-88-82;   

e-mail: [sonis-npf@yandex.ru](mailto:sonis-npf@yandex.ru);  
<https://www.sonis.vrn.ru>